


徘徊お知らせ

# アクセスコール受信送信機

AC-2WM(人の動きセンサー+小電力送信機付)(屋内専用)(TAISコード 00021-000114)

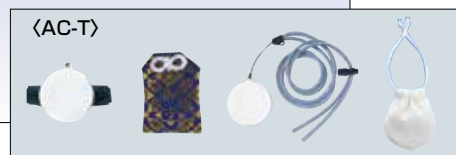

4種の付属品

小電力送信機付加で配線工事不要です。  
フラッシュとメロディーでお知らせします。

## 「徘徊お知らせ」用途に

アクセスコール送信機「AC-T」と組み合わせて使用します。  
送信機の電波を受信し、人の動きセンサーのエリアに入るとフラッシュとメロディーでお知らせすると共に小電力電波発信します。

## 特長

- 人の動きセンサー一体型です。センサーは、左右角度調整、感度調整が可能です。
- 小電力送信機を内蔵しており、ワイヤレスで受信機にお知らせします。
- 報知時間は、3秒、10秒、30秒です。
- 8種類のメロディー(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。
- 壁面に設置できるため送信機との距離が近く、微弱電波の感度調整がしやすくなります。  
感度調整しやすい“16段階ダイヤル式”を採用。
- AC100V(2m)コード付き。  
※設置高さ：床面より0.8～1.2m


## 徘徊お知らせけいたいくん(セット品)

徘徊お知らせセット2品番揃えています。  
電波登録済ですぐに使用できます。

- 1) 卓上型受信機セット「ACW-S(T)」  
AC-T, AC-2WM, HC-350
- 2) 携帯型受信機セット「ACW-S(KE)」  
AC-T, AC-2WM, RXF-60K


## 用途例

送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけない方法も可能です。

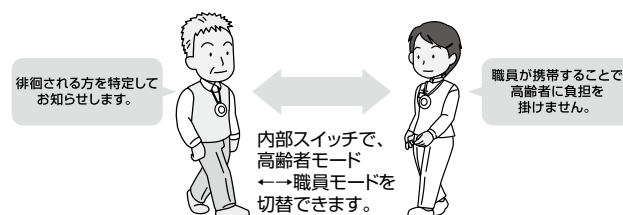

# ヘルスケア用〈徘徊お知らせ機器〉

## 用途例

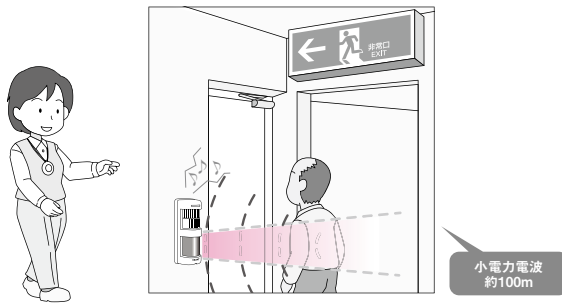

## スタッフステーション


非常口だわ!



卓上型受信機  
HC-350

## システム構成図

### ■徘徊お知らせ

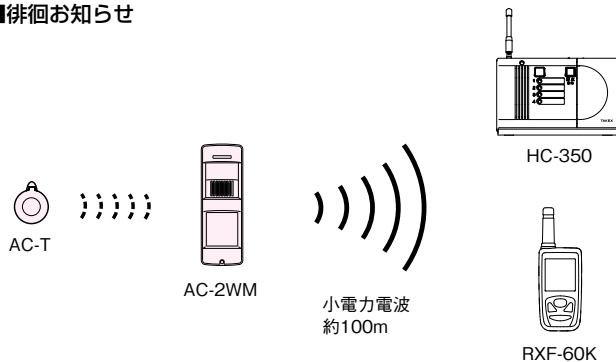

### ■セット品

徘徊お知らせけいたいくん

#### ●卓上型受信機セット

ACW-S(T)  
(TAISコード00021-000083)

#### ●携帯型受信機セット

ACW-S(KE)  
(TAISコード00021-000101)



アクセスコール送信機  
(4種の付属品付き) AC-T



アクセスコール受信機  
AC-2WM

+

+




卓上型受信機  
HC-350




携帯型受信機  
RXF-60K

## 検知エリア図

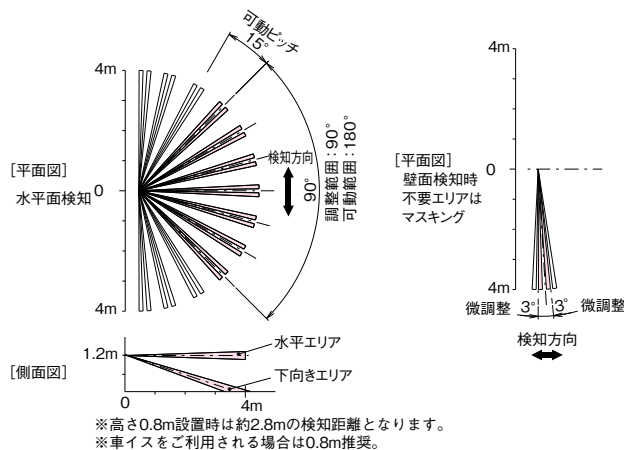

## 外形寸法図 (単位: mm)

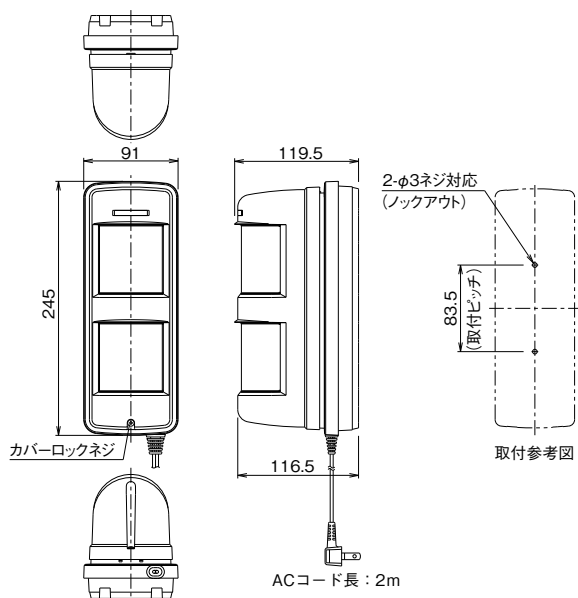

### ■仕様

品番		AC-2WM
電源	検出方式	パッシブインフラレッド方式
	検知エリア	スポット検知 最長部: 4m 開き角: 90° 水平: 7対 下向き: 7対
	エリア角度調整範囲	±90°
受信部	受信周波数	315.8MHz
	受信方式	スーパーヘテロダイン方式
	電波到達距離	最大8m(推奨: 2m以下)
送信部	使用周波数帯	426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
	出力	10mW以下
	電波到達距離	約100m(見通し距離)
フラッシュ		・「運用」設定時: 出力時、フラッシュ部が約0.4秒点滅/0.4秒消灯を繰り返す ・閃光色: 緑色(高輝度LED×4個) ・「点検」設定時: パッシブ検知時点灯
報知音		1CH ビンボンバンボン 5CH ビーボービーボー(緊急音) 2CH ブルブルブルブル 6CH エリーゼのために 3CH ボロロロン 7CH アニーローリー 4CH ウーウーウー(緊急音) 8CH ローレライ
付帯機能		・タイマー時間切替機能: 3秒/10秒/30秒 ・音量ボリューム調整機能: 無音~70dB
使用可能周囲温度		-10℃~+50℃
設置場所		屋内: 壁面のみ
設置高さ		床面より0.8~1.2m(車イスをご利用される場合は0.8m推奨)
質量		約850g
外観		本体: 樹脂(白)、フラッシュ部: 樹脂(乳白色)、センサー部: 樹脂(グレー)